

1. 품목허가(인증 또는 신고)번호 : 제신 18-138호

2. 품목명 : 치과임플란트시술기구

3. 제품명, 모델명: 제품라벨 참조

4. 제품설명

치과용 임플란트 시술 시에 사용되는 시술 기구로 고정체를 식립하기 위하여 사용되는 제품이며, Stainless, Titanium으로 제작된다. 상세한 정보는 매뉴얼, 카탈로그 또는 자사 홈페이지(www.zerosimplant.com)에서 참고하시기 바랍니다.

5. 사용 목적

치과용 임플란트를 시술하는 데에 사용되는 기구

6. 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용설명서를 숙지한다.
- 2) 제품의 포장상태를 확인한다.
- 3) 비멸균 제품으로 시술 전 반드시 121°C, 0.45 MPa 이하에서 15분간 습열멸균(KS P ISO17665-1)한다.
- 4) 개봉 후에도 제품 이상 여부를 확인한 후 사용한다.

나. 사용방법

- 1) Parallel Pin
 - Drilling 후 Fixture 식립 전 식립 방향을 미리 확인하기 위한 기구이다.
- 2) Drill Extension
 - Hand-piece를 사용하여 기구를 사용할 때 인접치아에 간섭이 발생할 경우 사용되는 기구이다.
- 3) Hand Driver
 - Abutment Screw를 고정체에 체결하기 위해 사용되는 기구이다.
- 4) Hand Piece Connector
 - Fixture를 Hand-piece를 이용하여 치조골에 식립할 때 사용되는 기구이다.
- 5) Ratchet Connector
 - Fixture를 Ratchet Wrench를 이용하여 권장 Torque로 식립할 때 사용되는 기구이다.
- 6) Ratchet Wrench
 - 구강 내에서 손으로 사용하기 힘든 경우 사용되는 기구이다.
- 7) Lindemann Drill
 - 골고정체의 식립을 위한 초기 hole을 형성하는 데 쓰이는 시술기구이다.
 - 가) Hand-piece에 체결 후 사용한다.
 - 나) Bone의 density에 따라 speed를 조절하여 사용한다.
- 8) Point drill
 - 고정체의 식립을 위한 초기 hole을 형성하는 데 쓰이는 시술기구이다.
 - 가) Hand-piece에 체결 후 사용한다.
 - 나) Bone의 density에 따라 speed를 조절하여 사용한다.
- 9) Crest Burr
 - 골폭이 좁고 얇아진 뼈를 평평하게 다듬는데 사용한다.
 - 가) Hand-piece에 체결 후 사용한다.
 - 나) Bone의 density에 따라 speed를 조절하여 사용한다.
- 10) Step Drill
 - 고정체의 식립을 위한 hole을 형성하는 데 쓰이는 시술기구이다.
 - 가) Hand-piece에 체결 후 사용한다.
 - 나) Bone의 density에 따라 speed를 조절하여 사용한다.

- 다) 식립 될 고정체의 길이에 맞는 Drill을 선택하여 천공한다.
- 11) Spread Drill
- 고정체의 식립을 위한 Hole을 형성하는 데 쓰이는 시술기구이다.
- 가) Hand-piece에 체결 후 사용한다.
- 나) Bone의 density에 따라 speed를 조절하여 사용한다.
- 다) Bone의 density가 낮은 경우 사용된다.
- 12) Tissue Punch
- 잇몸에 구멍을 만들 때 사용한다.
- 가) Hand-piece에 체결 후 사용한다.
- 나) 치조골이 보이면 Hand-piece의 조작을 멈춘다.

7. 사용시 주의사항

가. 경고

부적절한 환자의 선정과 시술이 임플란트의 실패나 지지하고 있는 뼈의 손실을 가져올 수 있습니다. 제로스 제품은 규정하는 사용목적 외에 사용되어서는 안 되며, 어떠한 방식으로든 개조되어서도 안됩니다. 임플란트의 동요, 뼈의 손실, 만성적 감염은 임플란트 시술의 실패를 일으킬 수 있습니다. 일회용 의료기기를 재사용할 경우에는 감염, 골유착 실패, 정밀도 저하로 인한 보철물 손상 등이 발생할 수 있습니다.

나. 의료기기의 특성을 고려한 건강상태 등에 대한 주의사항(금기증)

식립 후 적절한 폭과 높이의 치조골이 임플란트 주위에 확보되지 않을 정도로 흡수된 경우에는 사용하지 마십시오. 불충분한 Bone, 불량한 골질, 과대한 흡연, 또는 Blood Disorder, Uncontrolled Diabetes와 같은 증상의 환자에는 골융합의 부족이나 임플란트의 실패가 일어날 수 있습니다.

다. 사용시 주의사항

- 가) 본 제품은 의료기기로서 시술 전에 반드시 Autoclave에서 소독한 후 사용하시기 바랍니다.
- 나) 사용 후에는 혈액, 조직절편 등에 오염되지 않도록 신속하게 소독액에 담가 주십시오.
- 다) 소독제나 세정제는 흐르는 물에 충분히 씻어 주십시오.
- 라) 부착물은 나일론 브러쉬로 충분히 세척하여 주십시오.
- 마) 오염이 심한 기구는 초음파 세척기로 세정하여 주십시오.
- 바) 수술이 끝난 후 사용된 모든 기구는 즉시 분리하여 세척 후 건조하여 고압 증기 멸균(132°C, 15분)하여 주십시오.
- 아) 소독 및 세척제로 사용되는 과산화수소는 Laser marking, Color Coding이 손상 또는 변색이 발생할 수 있으므로 사용을 금합니다.
- 자) Laser Marking은 치수를 표시한 선으로 치수의 기준은 Laser Marking의 하단입니다.
- 차) Drilling 시에는 Hand-Piece를 수직방향으로 상하로 움직여 주시기 바랍니다.(Pumping)
- 카) Drilling 시에는 Bone과의 마찰열을 줄이기 위하여 반드시 식염수(Saline Solution)를 뿌려주시기 바랍니다.
- 타) Drill의 권장 사용횟수는 50회이고 사용 속도는 800~1,200rpm을 권장합니다.
- 파) Driver와 Drill의 권장 사용횟수를 초과하여 사용할 경우, Drill의 절삭력 저하에 의한 Bone Heating으로 임플란트의 실패가 발생할 수 있으므로 권장 사용횟수를 지켜주시기 바랍니다.

8. 부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원 (080-080-4183)

9. 보관방법

- 가. 실온(1°C~30°C)에 보관한다.
- 나. 화학 약품의 보관 장소나 가스가 발생하는 곳을 피하여야 한다.

10. 포장단위: 제품라벨 참조

11. 제조번호/제조연월: 제품라벨 참조

12. 제조업자 정보

제조업자명 : (주)제로스

제조업자 주소 : 경상남도 김해시 서김해산단안길 27, A동

홈페이지 : www.zerosimplant.com**13. 첨부문서의 작성연월: 2025 년 03 월****14. Labeling Symbol**

	비멸균		사용상 주의사항		카탈로그 번호
	제조번호		제조일자		보관온도
	제조사		포장이 손상될 경우 사용 금지		사용설명서 참조
	직사광선 금지		습기엄금		